

# スマツシヤ

HTF-35

## 新機能を搭載した新世代の粉碎機



粉碎機シェア  
トップクラス

5秒フラッシュ

8秒フラッシュ

連続作動

粉碎する錠剤の量や  
硬さによって

**3**パターンの機能

が選択できる

## メンテナンス性の向上

ミキサー部  
お手入れ方法

お手入れやすく、部品の取り外しが可能となりました！



ベアリング軸の取り外し



ウレタンマットの取り外し



新旧見分け方

旧型



Smasher ロゴあり

新型



Smasher ロゴなし

注意 ※ベアリング軸・ウレタンマット取り外しは、新型ミキサー部 HTF-C2のみ対応。  
旧型ミキサー部 HTF-A2は対応不可。  
※新型ミキサー部 HTF-C2は水洗い不可。ふき取りのみ可能です。

錠剤の投入方式は従来の粉碎機と同様です。



3段式に分離しますから、受皿カップに錠剤投入後はミキサー部を重ね合わせて本体に連動します。

粉碎する錠剤の量や硬さによって

### 3パターンの機能を選択できる粉碎機

1 5秒間欠作動（1サイクル23秒）

5秒フラッシュ



粉碎量の少ない時や、比較的軟らかい錠剤の時に最適です。

2 8秒間欠作動（1サイクル35秒）

8秒フラッシュ



粉碎量の多い時や、硬い錠剤を粉碎する時に最適です。

3 連続作動（40秒後自動停止）

連続作動



始動・停止は自在です。①や②のパターンでは面倒だったり不都合な場合に自在に使用できます。

### 便利な停止スイッチ

作動している本機を停止するには、3つのどのスイッチを押しても停止スイッチになります。

### 変形4枚刃採用

粉碎刃は粉碎を目的とした高度ステンレス製で変形4枚刃を採用し、粉碎効果を向上させています。

製品名	スマッシャー
型番	HTF-35
粉碎能力（連続時）	5錠～150錠（フラッシュシステム利用）
粉碎時間（連続時）	（50錠の場合）10～15秒
粉碎時間（フラッシュシステム）	（50錠の場合） <sup>5秒フラッシュ/23秒</sup> <sub>8秒フラッシュ/35秒</sub> （停止自在）
刃・受皿カップ材質	高度ステンレス 変形4枚刃
ミキサー部/本体材質	アルミ/ABS樹脂
回転数50/60Hz	約13,500回転～約14,500回転
サイズ	高さ：288 幅・奥行：175(mm)
重量	2kg
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	150W
定価	68,000円（税抜）

### 消耗品・追加購入品

製品名	受皿カップ	ミキサー部	ベアリング軸	ウレタンマット	替刃	ナット（2ヶ入）	ハケブラシ（2本入）
型番	HTF-A1	HTF-C2	HTF-C5	HTF-C6	HTF-B1	HTF-B4	HTF-B3
定価（税抜）	10,000円	22,000円	4,800円	1,500円	3,000円	1,000円	1,200円

## daido 大同化工株式会社

本社／〒570-0016 大阪府守口市大日東町34番2号  
 TEL (06) 6901-1855 (代表) FAX (06) 6901-1910  
 東京／〒144-0034 東京都大田区西糀谷2丁目26番4-101号  
 TEL (03) 6423-6331 FAX (03) 6423-6332  
 九州／〒812-0014 福岡市博多区比恵町2番28-102号  
 TEL (092) 292-7188 FAX (092) 292-7198  
 お問い合わせe-mail info@daido-kako.com

●仕様などは改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせは

大同化工株式会社 調剤便利グッズ で 検索  
 調剤便利グッズホームページ <http://www.daido-kako.com/>